

Producto **Micro Dap Diphoterine ® 100 ml**
Código **600106**

Descripción	Micro Dap Diphoterine ® 100 ml lavado de piel formato individual espray.
Marca	Diphoterine ® Prevor
Procedencia	Francia

Características técnicas del producto

Ducha de descontaminación química de emergencia para piel, solución Diphoterine®
 Para pequeñas zonas del cuerpo como: manos, rostro, cuello.

Imagen referencial



Características específicas Lis 50 ml Diphoterine®	Dimensiones	178 mm de altura 40 mm de diámetro
	Cantidad	100 ml
	Peso	200 g
	Contenido	Solución Diphoterine®
	Utilización	Una mano o un pie
	Plazo de intervención	Máximo 60 segundos
	Accesorio disponible	Funda: estuche por el cinturón
	Es Estéril	El contenido liquido esterilizado
	un solo Uso	Después de su uso debe desecharse.
	Clasificación según Minsal	Dispositivo medico clase 2
	Gas propulsor	Nitrógeno comprimido Clase 2-Nch2190-19 gas no inflamable.
	Almacenamiento	Proteger de la intemperie y de golpes
Cobertura sobre grupos de químicos	Cobertura	Se puede usar en Ácidos, bases, solventes, quelantes , oxidantes y reductores.

<p>Ventajas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portátil, Ligero y compacto. ▪ Fácilmente identificable y manejable. ▪ Utilización simple y lista para el uso. ▪ Permite una acción rápida. ▪ El aplicador ocular ergonómico facilita la apertura del ojo. ▪ Lavado suave sin presión y autónomo. ▪ Solución estéril. ▪ Equipado de precintos que garantizan la integridad del dispositivo. ▪ Control fácil de la eficacia del lavado: uso total y único. ▪ Impermeable y compacto. ▪ Sin mantenimiento ni instalación particulares. ▪ Conforme a la norma EN 15154-4. ▪ Certificación CE.
<p>Protocolo de uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formato indicado para proyecciones en la piel, una salpicadura, de sustancia química en la piel. ▪ Se aplica sobre la zona dañada, inmediatamente después del accidente según el protocolo Prevor. ▪ En caso de usar sobre el rostro , cierre los ojos durante su aplicación. 
<p>Características Diphoterine®</p>	<p>Diphoterine® es una ducha de descontaminación química, aplicable a ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores oxidantes</p> <p>Máximo efecto Extraer el químico de la piel, evitando el desarrollo de la quemadura química en una aplicación hasta los 60 primeros segundos.</p> <p>Es una solución Hipertónica, Anfótera y Multiagente. Diphoterine® está clasificado como “Dispositivo medico clase 2 uso externo.” No sujeto a control de medicamentos.</p> <p>No es toxico</p> <p>Sin reacciones químicas, ni efectos secundarios.</p>